

## Kratki vodič - kako postupiti u slučaju nepravilnosti u radu aneroidnog mjerača pritiska

Poštovani Korisniče,

Pre svega želimo da Vam se zahvalimo što koristite proizvod iz našeg asortimana. Mi želimo da budete srećni sa svojim novim aparatom. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili uočite nepravilnost u radu aparata, molimo Vas da pročitate *Uputstvo za upotrebu* i ovaj kratki vodič sa najčešćim pitanjima i odgovorima. Ukoliko ne uspete da rešite problem, molimo Vas da kontaktirate naš servis.

**Kontakt telefon za informacije i reklamacije: +387 65 273 945**

<b>Najčešća pitanja i odgovori</b>	
<b><i>Zvuk koji se čuje je slab, izobličen ili se čuju neuobičajeni zvuci</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li su nastavci za uši prljavi ili polomljeni. Ukoliko ne, proverite da li dobro pašu i da nisu ishabani.</li><li>• Proverite da li je crijevo puklo ili presavijeno.</li><li>• Proverite da li ima oštećenja na membrani djela za grudi.</li><li>• Proverite da li je deo za grudi u kontaktu sa kožom i da li leži na brahijalnoj arteriji. Očistite ili zamijenite neispravne djelove ukoliko ih ima da biste izbegli netačno mjerenje.</li></ul> <p><b>Ako se i posle ovoga problem javlja javite se na telefon za informacije i reklamacije radi popravke aparata.</b></p>
<b><i>Pritisak ne raste, iako balon za pumpanje pumpa</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je ventil zatvoren.</li><li>• Proverite da li je manžetna ispravno povezana za balon za pumpanje i manometar.</li><li>• Proverite da li manžetna, crevo i/ili balon za naduvavanje propuštaju</li></ul> <p><b>Ukoliko utvrdite da neki od delova propušta vazduh javite se na telefon za informacije i reklamacije radi popravke aparata.</b></p>
<b><i>Ispuštanje vazduha ne može biti podešeno na 2-3 mmHg/sec. podešavanjem ventila za oslobađanje vazduha</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odvojite ventil od balona za naduvavanje</li><li>• kako bi proverili da li postoji smetnja za protok vazduha u ventilu. Otklonite smetnju i pokušajte ponovo.</li></ul> <p><b>Ukoliko i dalje ne funkcioniše javite se na telefon za informacije i reklamacije radi zamene ventila.</b></p>
<b><i>Igla manometra ne pokazuje 0 +/- 3 mmHg pri mirovanju.</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je ventil podešen na nultu poziciju radi provjere.</li></ul> <p><b>Ukoliko je odstupanje i dalje veće od 3 mmHg, javite se na telefon za informacije i reklamacije radi rekalkibracije manometra.</b></p>